

RO

## REF: AD73 MĂNUȘĂ PROTECȚIE PACIENT CU PLASĂ (PERECHE)

Dispozitiv medical de clasa I conform Directivei Europene pentru Dispozitive Medicale 2017/745 și ca atare respectă cerințele esențiale care i se aplică.

Pentru a asigura funcționarea corectă și performanța optimă a acestui dispozitiv medical, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Verificați aspectul exterior corect al produsului și integritatea acestuia, precum și integritatea ambalajului.

Conținutul pachetului: 1 pereche de mănuși, 2 curele pentru balustradă, 1 manual de instrucțiuni, 1 foaie de instrucțiuni, 1 foaie de hârtie, 1 manual de instrucțiuni, 1 fișa de publicitate.

**INDICAȚII:** Produs de protecție dezvoltat pentru a preveni auto-rânirea pacientului. Produsul încorporează curele de fixare suplimentare care permit atașarea mănușii de șina de pat. Fabricat din plasă respirabilă și fibră siliconică goală. Mâna rămâne întotdeauna vizibilă.

**CONTRAINDICAȚII:** A nu se utiliza în caz de alergii la oricare dintre componente.

**INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ:** Starea produsului trebuie verificată în mod regulat. Nu trebuie făcute modificări produsului original. Acest produs nu trebuie pus în contact direct cu o zonă rănită. Se recomandă verificarea și verificarea frecventă a faptului că utilizatorul utilizează corect produsul. Datorită naturii textile a componentelor, nu expuneți produsul la o sursă de căldură sau umiditate. Nu se cunosc efecte secundare.

### INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE:

1° Introduceți mâna pacientului în mănușă și închideți velcro alb intern. 2° Închideți Velcro pe plasă.

3° Închideți velcro extern negru.

Dacă doriți să atașați mănușa de șina pentru pat: Introduceți cureaua în bucla de pe spatele mănușii și atașați-o de șină închizând catarama și ajustând la dimensiunea dorită.




### Dimensiune UNICĂ

MĂRIMEA	Lungime	Lățime
UNICĂ	31,5 cm	18 cm

**COMPOZIȚIE:** țesătură foaie; 100% bumbac. Căptușeală din plasă: 100% poliamidă. Velcro/bandă: 100% poliamidă. Cataramă: acetal.

**DEPOZITARE ȘI ÎNȚETIRE:** Se spală la mașină la 30° max. Nu curățați uscat sau călcați. Nu uscați cu mașina. A nu se folosi în âlbitor A se pastra la loc uscat, ferit de lumina, la temperatura camerei în ambalajul original.

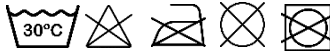

**REUTILIZARE:** Având în vedere scopurile sale terapeutice, acest produs nu este reutilizabil de către o altă persoană.

**MANAGEMENTUL DEȘEURILOR:** În ceea ce privește gestionarea deșeurilor, produsul și componentele acestuia respectă prevederile în vigoare stabilite de autoritățile locale.

**GARANȚIE:** 24 de luni de la data achiziției. Trebuie să păstrați factura ca dovadă de cumpărare pentru orice reclamație. Produsul este destinat exclusiv utilizării descrise în acest manual. Orice daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare este exclusă din garanție. Daunele sunt limitate la valoarea bunurilor. Despăgubirile pentru daune indirecte sunt excluse în mod expres.

Orice incident grav legat de produs trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

